



DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU

STERANIOS 2% ET BANDELETTES DE CONTRÔLE

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU


- Solution prête à l'emploi: sans activateur
- Contrôle de la conformité du bain désinfectant par bandelettes




tamponnée à pH 6 (citrate de sodium)
pe de matériaux



1. Rincer
Respecter le temps de trempage recherché.
Après le trempage, rincer avec de l'eau stérile (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit.

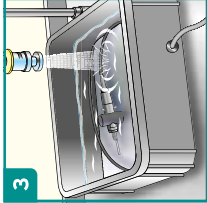

2. Sécher
Rincer abondamment à l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm) pour éliminer toute trace de produit. Pour le matériel d'endoscopie: rincer les parties internes et externes du dispositif médical.

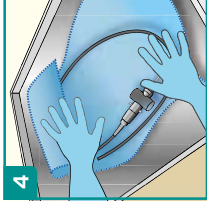

3. Stocker
Sécher avec un champ à usage unique. Garder le dispositif médical le plus aseptiquement possible pour le réutiliser.

NOTES

	TEMPS DE CONTACT
	5 min
	5 min
	10 min
	10 min
	10 min
	10 min
	60 min

= Conditions de propreté selon EN 17126

DITONNEMENT	RÉFÉRENCE
bidons de 5 L	3820345D
bandelettes de contrôle	100987

INDICATIONS

100 bandelettes de contrôle du taux de glutaraldéhyde dans la solution de STERANIOS 2%.

MODE D'EMPLOI

- Tremper la bandelette pendant une seconde, la sortir en la secouant pour éliminer l'excès de liquide
- Lecture après 15 secondes
Rose uniforme - CONFORME
Rose orange - NON CONFORME
- Ne jamais interpréter un résultat obtenu plus de 30 secondes après trempage
- Pour la fréquence d'utilisation, se reporter au mode d'emploi de l'étiquette du STERANIOS 2%

CONDITIONS DE STOCKAGE

Réfermer le tube après prélèvement d'une bandelette. Conserver à l'abri de l'humidité. Respecter la date limite d'utilisation reprise sur l'étiquette. Se conserve 90 jours après ouverture. Stocker entre +5°C et +25°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éliminer le produit et son récipient en prenant toutes les précautions d'usage. Usage réservé aux professionnels.

COMPOSITION

Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, surfactant, colorant et excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi (élaboré selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stockage: entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'activité antimicrobienne complète de Steranios 2% est incluse dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Adelya, Terre d'Hygiène



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :

LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

