




Fiche Technique et de Sécurité Bracelets d'identifications

Réf. N° : 16 105 46/ 16 106 40/ 16 106 41

TCE3

Créé le : 21.11.2012

Mise à jour: 12.09.2014

Indice : c

Description générale	Bracelet d'identification inviolables pour adultes et enfants de plus de 2 ans		
Classe du DM	N'est pas considéré comme un Dispositif médical pas de marquage CE		
Pièces jointes	Oui	Photo, et schéma technique	
Référence lot	Oui	Voir sur la boîte	
Dispositif raccordé	Non		
Dispositif Usage Unique	Oui	Mono patient pendant l'utilisation puis jetable	
Dispositif stérile	Non		
Stérilisation	Oui	À l'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma	
Autoclavable	Non		
Nettoyage	Oui	Avec une solution n'attaquant pas le PVC, au détergent	
Substance impropre	Produit attaquant le PVC comme le l'acétone, le benzène, le chloroforme.		
Pièces constitutives	Oui	Un bracelet, une étiquette et un stylo permanent.	
Matières	En PVC pour le bracelet et en papier pour l'étiquette. Hypoallergénique.		
Contient du latex	Non		
Norme	EN 71		
Etiquetage	Oui	Nom, référence, lot, usage unique, quantité.	
Emballage	Oui	Boîte en carton de 100 bracelets.	
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.	
Durée d'utilisation	Moyenne		
Marquage sur le DM	Non		
Références + extensions	16 105 46	16 106 40	16 106 41
Désignation	Adulte	Enfants rose	Enfant bleu
Dimensions Lo x La x H (mm) +/- 3mm	250 x 25 x 12	170 x 19 x 12	
Diamètre d'utilisation (mm)	Min = 20 ; Max = 70	Min = 20 ; Max = 45	
Epaisseur (mm)	0.5		
Poids net par 100 g (g)	232		
Couleurs	transparent	rose	bleu
Resistance température (°C)	-20 à +70°C		
Taux de réversibilité de flexibilité	Rigide		
Utilisation	Dispositif inviolable permettant l'identification des personnes		
Mode d'emploi	<p>1/ Prendre un bracelet et inscrire le nom de la personne soit sur l'étiquette soit directement sur le bracelet, côté fenêtre, avec le feutre à écriture permanente.</p> <p>2/ Insérer l'étiquette avec l'inscription du côté du plastique transparent jusqu'au bout et garder en main la partie détachable, détachez ensuite le bout détachable.</p> <p>3/ Mettez le bracelet autour de la partie à identifier en gardant le côté transparent vers l'extérieur pour pouvoir lire le nom.</p> <p>4/ choisissez la longueur voulue en insérant la pointe dans le trou choisi en fonction du diamètre de la partie à identifier.</p> <p>5/ Rabattre le clip de fermeture sur le pignon en serrant fort jusqu'à entendre le bruit du clip de verrouillage. Vérifier si ce dernier est bien installé.</p> <p>6/ Coupez si nécessaire la languette restante en prenant soin de ne pas laisser de bord coupant.</p> <p>7/ Pour enlever le bracelet, coupez la languette avec des ciseaux adéquat..</p>		
Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique	<p>Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.</p> <p>A utiliser en usage unique par personne. Ne serrez pas le bracelet à fond mais laisser un espace suffisant, le bracelet doit toujours pouvoir bouger. Ne pas laisser de bord tranchant. Bien vérifier que le bracelet est fermé en tirant légèrement dessus et qu'il ne peut glisser hors du poignet . Ne pas chauffer le dispositif ou le laisser sur la peau en contact serré et permanent ou sur des plaies ouvertes.</p>		
Recyclage	Oui		
Récupération	Dans les bacs de déchets plastiques		
DEEE/REACH	Non/ NC		
Phtalates/PVC	Non/ Oui		
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		

Rédacteur : HEINRICH Laura

Fonction : ARQ

Paraphe : LH

COMED sas
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr