

50266-FT.pdf

AEROSEPT 100 VF

ASEPTANIOS TERMINAL HPH



Désinfectant des surfaces par voie aérienne



Désinfection des surfaces par voie
aérienne. Agrément n°277 du
Ministère de la Santé.

AEROSEPT 100 VF

50266-FT.pdf



Désinfection des surfaces par voie aérienne

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique.
Associé aux produits ANIOS SPECIAL DJP et ASEPTANIOS TERMINAL HPH.

Maniement aisé

- Aspiration automatique du produit désinfectant (pas de remplissage manuel du réservoir).
- Programmeur électromécanique gradué en m³ (cubage du local) et en min. (temps de diffusion).
- Temporisation de 1 minute : l'opérateur quitte la pièce avant diffusion de l'aérosol.
- Récupération accélérée des locaux par une mise en route du ventilateur.

Fonctionnement séquentiel entièrement automatique

- Aspiration du produit désinfectant et régulation du débit par l'intermédiaire de la pompe péristaltique.
- Production d'air comprimé et alimentation de la buse.
- Mise en marche de la ventilation.
- Production simultanée de l'aérosol au niveau de la buse.
- Diffusion de cet aérosol et homogénéisation sous l'action du ventilateur.
- Arrêt automatique en fin de programme.

Buse nettoyante

- Nettoyage manuel de l'orifice de diffusion à l'aide d'une aiguille, par simple appui sur le poussoir avant chaque mise en service.
- Evite tous les colmatages et destructions secondaires par débouchage manuel intempestif.

Fiabilité

- Compresseur étanche fonctionnant sans huile.
- Pompe péristaltique à débit constant (précision 1%).
- Ventilateur étanche ne demandant aucun graissage.
- Monocoque en polyéthylène bicolore, d'entretien aisé.

Sécurité

- Formes et dimensions ergonomiques.
- Protection assurée par un socle arrondi.

Mode d'emploi

- Programmer le volume de la pièce à traiter en tournant le bouton de la minuterie, dans le sens horaire jusqu'à la graduation correspondante.
- Temporisation automatique de 1 minute avant diffusion du produit.
- Aspiration automatique du produit.
- Temps de contact : 2 heures. (dans le cas de l'ASEPTANIOS TERMINAL HPH).
- La récupération accélérée peut être enclenchée en positionnant l'interrupteur sur EN (env. 30 minutes).

Caractéristiques techniques

- Volume maximal à traiter : 230 m³.
- Débit moyen : 984 ml/h.
- Ventilateur hélicoïdal : 250m³/h.
- Compresseur étanche à membrane.
- Poids à vide : 27 kg.
- Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm).
- Alimentation : 220V - 50 Hz.
- Puissance : 600 VA.