

# SALVANIOS pH7

50207A-FT.pdf

CE  
0459

Nettoyant  
Pré-désinfectant  
des instruments



- Association à base de propionate d'ammonium quaternaire et d'acétate de guanidinium (effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux)
- Détergence optimisée
- Large spectre antimicrobien en 15 minutes (bactéricide, fongicide, actif sur B.K., HIV-1, HBV et Herpès virus)
- Recommandé pour un cycle de traitement utilisant l'acide peracétique en combinaison.
- Compatible avec les bacs à ultra-sons

## INDICATIONS

Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel endoscopique.  
Ramassage de l'instrumentation souillée.

## CARACTERISTIQUES

- Solution limpide de couleur jaune
- Se dilue en eau froide ou tiède (max. +55°C)
- Stabilité physico-chimique à dilution jusque 70°C
- pH du produit pur à 20°C : env. 7
- pH du produit à dilution à 0,5 % : env. 7
- Produit conforme à la Directive 93/42/CEE

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml → 5L




0,5%  
5 à 15 min.

# SALVANIOS pH7


Nettoyant pré-désinfectant des instruments

## MODE D'EMPLOI

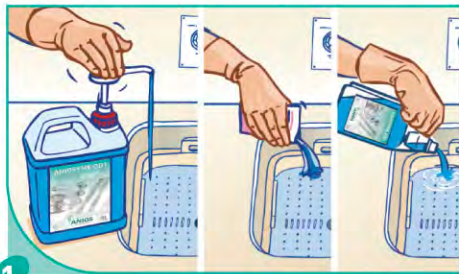


### 1 Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.  
Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

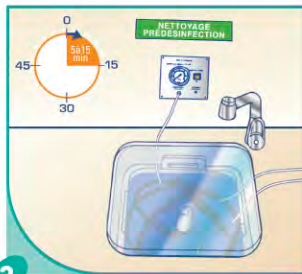


Immerger complètement le dispositif médical.

**Temps de trempage conseillé : 5 à 15 min.** selon le spectre antimicrobien recherché.  
Brosser si nécessaire.  
Pour le matériel endoscopique : double nettoyage : 10 et 5 minutes.  
Ecouillonner

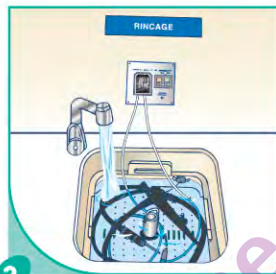

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (bonne qualité microbiologique).  
Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

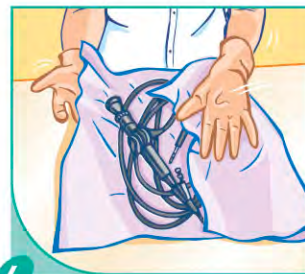

Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

## COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, propionate de N,N-didécyL-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium, tensio-actifs non ioniques et amphotères, séquestrant, colorant, parfum, excipients.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| Actif sur             | Normes                            | Temps de contact        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Bactéries             | EN 1040, EN 13727, NF T 72-170    | 5 minutes               |
| Mycobactéries         | Mycobacterium tuberculosis (B.K.) | 15 minutes              |
| Levures / Moisissures | EN 1275 (Candida albicans)        | 5 minutes               |
| Virus                 | HIV-1, HBV<br>Herpes virus        | 15 minutes<br>5 minutes |

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).  
Stockage : de +5°C à +35°C.

## CONDITIONNEMENTS

- 1 200 doses de 25 ml.....Réf. 256.097  
200 doses de 50 ml.....Réf. 256.125
- 2 12 flacons de 1 litre doseur.....Réf. 256.095
- 3 4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml.....Réf. 256.036

